

UPUTE ZA UZIMANJE PERIANALNOG OTISKA (Oxyuren, gljivice)

verzija 02/20

1. Da li je Vaš test paket potpun?

Molimo Vas provjerite da je li Vaš test-paket kompletan. Paket bi trebao sadržavati:

- **1 nosač objekta** (PREDMETNO STAKALCE) u spremniku za transport

Za uzimanje perianalnog otiska, dodatno Vam je potrebna celofanska ljepljiva traka (selotejp)!

2. Provedba testa

Kako bi rezultati ispitivanja bili što točnijih vrijednosti, molimo Vas da kod uzimanja perianalnog otiska obratite pozornost na sljedeće:

1. **Preporuka je da se perianalna regija ne pere jedan dan ranije.**
2. Uzorak se uzima ujutro. Rukama raširite gluteuse i ljepljivu stranu celofanske trake dobro pritisnuti dva do tri puta na nabore kože oko anusa.
3. Celofansku ljepljivu traku na kontaminiranoj strani prilijepiti natrag na predmetno stakalce (nositelj objekta) nastojeći da površina trake bude što ravnija.
4. Predmetno stakalce stavite u spremnik za transport.
5. Ispišite podatke na spremnik za transport (flomasterom) - datum (Datum), vrijeme (Uhrzeit) i ime (Name).
6. Dostavite uzorak s **ispunjenim obrascem za narudžbu** (s potpisom pacijenta).
7. Stavite uzorak zajedno s ispunjenim i potpisanom narudžbenicom u plavu transportnu vrećicu i pošaljite ili nam ga dostavite.

3. Slanje uzoraka

Prije slanja spremnik za transport zajedno s uzorkom te s ispunjenim **obrascom za narudžbu (ime i prezime pacijenta, adresa, datum i godina rođenja, potpis)** stavite u plavu vrećicu za transport.

Uzorci se **ponedjeljkom** (9.00-11.00), **utorkom** (8.00-11.00) i **srijedom** (8.00-11.00) zaprimaju na adresi: **Proimmun d.o.o.**, Haulikova 1, 10 000 Zagreb i šalju u laboratorij posebnom dostavom, uz napomenu da uzorak u trenutku slanja ne smije biti stariji od 24 sata.

Kod negativnog nalaza: preporučuje se test ponoviti nakon par dana.

ZAHVALJUJEMO VAM NA SURADNJI!

Vaš tim za Hrvatsku: PROimmun d.o.o.